

HICO-AMNICOT
Das ideale Instrument
für die gezielte Amniotomie

Gebrauchshinweise:

1. Ziehen Sie den AMNICOT über Zeige- oder Mittelfinger der behandschuhten rechten oder linken Hand.
2. Vergewissern Sie sich, daß das Reißhäkchen zum Handballen hin zeigt.
3. Damit das Reißhäkchen während des Gebrauchs fest sitzt, streifen Sie es eng über den Finger und bringen Sie es in die gewünschte Position, während der AMNICOT erst ca. 1 cm aufgerollt ist.
4. Jetzt rollen Sie den Fingerling bis zum Fingerende auf.
5. Bei der Wahl der Amniotomie bestimmen Sie, ob Kontraindikationen vorliegen, indem Sie einen Finger in die Cervix einführen. Ohne die Hand von der Vagina zu nehmen, nehmen Sie den Untersuchungsfinger heraus und führen den Finger mit dem AMNICOT ein. Streifen Sie sacht gegen die Fruchtblase, um sie zu öffnen.
6. **Achtung:**
Die Fruchtblase nicht mit zu starkem Druck öffnen! Prüfen Sie den Flüssigkeitsaustritt nach ein- oder zweimaligem Einritzen.

Autorisierter Alleinvertrieb:

HIRTZ & CO. KG
Hospitalwerk Köln
Bonner Str. 180
D-50968 Köln
DEUTSCHLAND

Hergestellt von:

GO MEDICAL INDUSTRIES PTY LTD
Subiaco
WESTERN AUSTRALIA

Vertretung Schweiz: Anel GmbH, info@anelmed.ch, Tel 031 333 26 35

Dieses Produkt enthält natürlichen Latex-Gummi!

STERILE R

NUR ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH!

**KÜHL UND TROCKEN AUFBEWAHREN
UND NICHT DEM LICHT AUSSETZEN!**

CE 0473